

MedPro® Elastigrip™



Tubulaire, compressif et élastique,
le bandage de confiance des professionnels.

Offre une liberté de mouvement et un soutien des tissus lors de traitements des foulures et des entorses, des blessures des tissus mous, des œdèmes généraux, des cicatrices post-brûlures et des blessures de la cage thoracique.

Il est parfait pour plusieurs types d'application :

Orthopédie

- Fournit un soutien ferme pour les entorses, les foulures et les gonflements.

Soins vasculaires

- Aide à favoriser la circulation sanguine dans le cadre du traitement des varices.

Chirurgie plastique et traumatologie

- Aide à prévenir et à traiter les cicatrices hypertrophiques, œdèmes et hématomes.

Convivial pour les patients

- Chaque fil élastique est isolé deux fois, afin d'aider à prévenir les irritations de la peau.
- Reste en position, pas besoin d'épingles ou de rubans adhésifs.

Autoclavable et lavable

- Peut être lavé et/ou stérilisé sans perdre son élasticité.

Disponible en plusieurs tailles

- Vaste gamme de tailles pour s'adapter à la plupart des applications.

Taille	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
Largeur approx.*	1,77" 4,5 cm	2,46" 6,25 cm	2,66" 6,75 cm	2,95" 7,5 cm	3,44" 8,75 cm	3,94" 10 cm	4,47" 12 cm	6,89" 17,5 cm	8,46" 21,5 cm	12,8" 32,5 cm
No d'article	118-580	118-581	118-582	118-583	118-584	118-585	118-586	118-588	118-589	118-587

* Non étiré. La largeur exacte du produit peut varier légèrement selon l'effet des facteurs ambiants.

Emballage convivial

- Boîte-distributrice facile à utiliser: il suffit de pousser puis de tirer sur la languette perforée pour accéder au produit.
- Tableau des tailles complet sur l'emballage.
- Boîte de style distributeur pour un accès facile et moins de déchets.

Longueur du produit: 10 m (10,9 vg).

Composition: 80% Coton, 11% Élastodiène, 9% Polyester

MedPro Elastigrip^{MC}

Informations générales



Les produits Elastigrip^{MC} sont des bandages de compression tubulaires réutilisables qui se présentent sous la forme d'un rouleau et sont coupés à la longueur voulue. La pression exercée sous les bandages varie en fonction du diamètre de la partie du corps. Par exemple, lorsque la circonférence du mollet est utilisée pour déterminer la taille du bandage, la pression la plus élevée est exercée sur le mollet et la plus faible sur la cheville. Le bandage est généralement appliqué en deux couches. Le plus souvent, le bandage est placé sur le membre inférieur et fournit un soutien dans le traitement de l'œdème en exerçant une compression circonférentielle faible (5 mmHg), modérée (10 mmHg) ou élevée (20 mmHg) en fonction de la mesure du mollet du client et de la taille du bas choisie. Une seule couche peut être utilisée au début pour les clients qui ont des difficultés à tolérer la compression, mais la pression exercée sera plus faible. Voir les instructions d'application d'Elastigrip^{MC}.

Utilisations prévues

Elastigrip^{MC} est approprié pour le soutien des entorses, des foulures, des lésions des tissus mous, des cicatrices post-brûlures; les instructions spécifiques pour ces utilisations ne sont pas incluses dans cette fiche. Cette fiche guide l'utilisation d'Elastigrip^{MC} pour la prise en charge de la compression des affections veineuses ou mixtes artérielles/veineuses.

Comment utiliser le bandage compressif tubulaire MedPro Elastigrip^{MC}

Exemple sur une jambe inférieure

- 1) Déterminer la compression souhaitée.
- 2) Mesurez la circonférence du membre du patient à son point le plus large.
- 3) Sélectionnez la taille correspondant à la mesure du membre et au niveau de compression souhaité. Consultez le tableau ci-joint.
- 4) Coupez une longueur double pour couvrir de la base des orteils jusqu'en dessous du genou ou de la cuisse, selon les besoins.
- 5) Appliquez en double couche à partir de la base des orteils.
- 6) Lavable et réutilisable 10 fois, puis jetable.

Description	Taille	# article AMG	Diamètre (cm)	Faible (5-10 mmHg)	Moyenne (10-20 mmHg)	Haute (20-30 mmHg)
				Circonférence de la partie du corps (cm)		
Mains et membres (petits)	B	118-581	6.25	15-17	17.5-25	25.5-30
Mains, bras et jambes fins (adultes)	C	118-582	6.75	14 – 16.5	17-24	24.5-29
Bras (grands) et jambes (moyennes)	D	118-583	7.50	15.5-18.5	19-26.5	27-31
Jambes (grandes) et cuisses (petites)	E	118-584	8.75	16-24.5	25-41	41.5-50
Genoux (grands) et cuisses (moyennes)	F	118-585	10.0	22-29.5	30-43	43.5-51.5
Cuisses (grandes)	G	118-586	12.0	25.5-34.5	35-47.5	48-55
Cuisses (très grandes) et tronc (très petit)	J	118-588	17.50	44-79	79.5-103	

Application – Jambe seulement

Avant la mobilisation du patient, en position couchée sur le dos, mesurez la partie la plus large du mollet.

- Choisissez la taille du bandage en fonction de cette mesure et du niveau de compression souhaité.

Déterminez la longueur du bandage nécessaire :

- Mesurez de la base des orteils jusqu'à 1 à 2 cm sous le genou en suivant la courbe de la jambe.
- Doublez cette mesure (selon les directives du médecin).
- Ajouter 2 à 3 cm pour le chevauchement.
- Appliquez un pansement approprié en cas de plaie.
- Appliquez le bandage en partant de la base des orteils et en remontant vers le genou, en vous arrêtant à environ 4 cm sous le genou.
- Repliez le bandage sur le membre en veillant à ce que les orteils soient dégagés et que la deuxième couche de bas soit placée 2 à 3 cm plus haut que la première.
- Assurez-vous que la couche supérieure est à au moins deux doigts sous l'arrière du genou. Assurez-vous que la circulation sanguine périphérique est adéquate. Lissez le bandage pour enlever les plis.

Pour enlever le pansement :

- Retirez le pansement (par exemple, au coucher) pour examiner la peau et lui prodiguer les soins nécessaires. Enlevez le pansement en le faisant glisser le long de la jambe et par-dessus le pied.
- Ne laissez pas le pansement tiré vers le bas ou affaissé autour des chevilles. Un pansement laissé tiré vers le bas ou affaissé autour des chevilles peut créer un effet garrot.

Mode d'emploi : Thérapie par compression

Pour les clients qui ont besoin d'une thérapie par compression légère pour le traitement des cas suivants :

- Insuffisance veineuse avec ou sans ulcère(s).
- Insuffisance artérielle/veineuse avec ou sans ulcère(s).
- Lymphœdème avec ou sans ulcère(s).
- Œdème généralisé.

Contre-indications :

- Ne pas utiliser chez les clients allergiques au latex.
- Ne pas utiliser en présence d'une insuffisance cardiaque non contrôlée.
- Ne pas utiliser en présence d'une infection de la peau ou d'une plaie non traitée.

Recommandations :

- Prendre soin de la peau, notamment en la nettoyant pour éliminer les peaux mortes si nécessaire, et en l'hydratant pour résoudre/prévenir le dessèchement de la peau.
- En présence d'une plaie, le pansement doit être réévalué si l'exsudat de la plaie s'infiltre dans le bas.
- Laver les bas permet de rétablir leur élasticité.
- Les bas doivent être lavés au quotidien à l'eau froide et suspendus pour sécher. Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de détergent agressif. S'il est bien entretenu, le bas peut être lavé jusqu'à dix fois.
- Il convient de toujours suivre les instructions du médecin, de l'ordonnance du médecin de famille ou les directives cliniques d'un clinicien spécialiste du soin des plaies/ISPSC et de l'organisme de santé approprié.

Précautions :

- Ce produit contient du latex.
- Les jambes très fines et les protubérances osseuses sont susceptibles de subir une pression excessive et des lésions tissulaires.
- Ne pas laisser les bas tirés vers le bas ou affaissés autour des chevilles, car cela risque de provoquer un effet de garrot.

Pour en savoir plus sur Elastigrip^{MC} de MedPro[®]
ou sur tout autre produit, communiquez avec votre
représentant MTM, composez sans frais le 1 800-361-0877
ou visitez notre site Internet : www.mtm.ca

DISTRIBUÉ PAR



190, Boul. St-Elzéar Ouest
Laval (Québec) H7L 3N3
T 450 669.8985 | 1 800 361.0877
F 450 669.9532 | 1 888 935.7001
www.mtm.ca